


Dcont® ETALON B VÉRCUKORMÉRŐ



RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

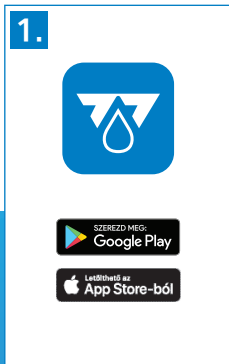

Telepítse telefonjára a Dcont® alkalmazást, jelentkezzen be. Lépjen a menüben a „Vércukormérőm” (Android esetén) vagy a „Bluetooth eszközök” menübe (iOS eszköznél). Indítsa el a keresést!

Kapcsolja be a vércukormérőt a KI/BE gomb rövid megnyomásával, a kijelzőn egy telefon ikon lesz látható.

A mobilalkalmazásban megjelenik az eszköz, kattintson rá. A vércukormérőn a mobil ikon nem villog tovább. Készen áll az adatfogadásra.

A tesztsík behelyezésére bekapcsol a készülék, vagy vércukormérés funkcióra vált, ha korábban bekapcsolta. Nem kell kódolni.

A vérminta felszívásához tartsa függőlegesen a készüléket, majd érintse a tesztsík sárga végét a vércsepphez.



Dcont® ETALON

B

VÉRCUKORMÉRŐ



RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



5. A készülék automatikusan elvégzi a mérést és 4 másodperc után megjelenik az eredmény (a jelölők villognak).



6. A BALRA és JOBBRA gombokkal az eredmény megjelölhető. A beállított jelölő mentéséhez nyomja meg a KI/BE gombot. Mielőtt kikapcsol a készülék, automatikusan elküldi a vércukoradatot okostelefonjára.



7. Tartsa a készüléket függőleges helyzetben és a csikkidobó gombbal távolítsa el a használt tesztcsíkot.



8. Lehetősége van az étkezés és inzulinbeadás időpontjának rögzítésére. Kikapcsolt állapotban a készülék BALRA gombjával a szénhidrát-, JOBBRA gombjával az inzulinbevittelt állíthatja be. A kiválasztott eseményt a KI/BE gomb rövid megnyomásával mentheti. Ezután a készülék automatikusan kikapcsol.

Feltétlenül olvassa el a Dcont® ETALON B, az ETALON Teszt tesztcsíkot és az ujjszűrő használati útmutatóját!